

PROCEDURE SPECIFIQUE D'EVACUATION DES PMR

La chaise de dégagement est utilisée pour évacuer des personnes handicapées.
Elle se range pliée à proximité des escaliers et est prête à l'emploi en quelques secondes.

Au Bâtiment I : elles sont au nombre de 3

- 2 dans la partie avant du bâtiment, dans la cage d'escalier au R+1 et R+2
- 1 au RDC proche des sanitaires dans un placard

Au bâtiment F : elles sont au nombre de 2

- 1 au R+1 dans un placard proche du bureau de la direction générale
- 1 au R+2 dans un placard à côté de la salle du conseil

Leur emplacement est matérialisé par le logo suivant :



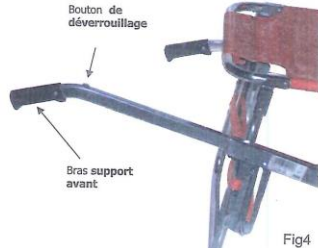
Le mode d'emploi suivant est affiché à coté de chaque chaise.

CHAISE DE DEGAGEMENT code **SED001**
Instructions et Entretien




Comment ouvrir la chaise:
En position plier (fig 1), tenir points A et B et écarter les deux parties jusqu'à la mise en place de la chaise Fig. 2

Comment préparer le patient pour le transport
Quand le patient est bien assis, abaisser les deux accoudoirs vers l'avant. Remonter les 2 bras arrière de portage de la chaise comme dans Fig. 3. Descender les 2 bras avant de portage vers le bas jusqu'au « clic » de verrouillage fig.4. Vous pouvez rallonger les 4 bars de portages en poussant sur le bouton de verrouillage à côté des poignées. La chaise sera alors identique à la fig. 2.

SYSTEME DE SECURITE
Pour obtenir une meilleure stabilité de la chaise en position ouverte, verrouiller la roue arrière gauche, fig. 5, pousser avec votre pied sur le point A. Pour déverrouiller le frein pousser avec votre pied sur point B.
Pour avoir une position des deux bras avant de portage identique à la chaise fermée tenir le système de verrouillage fig. 6 dans la main et tirer vers l'avant pour le débloquer et relever le bras. Des ceintures avec fermetures rapides sont fournies pour sécuriser le patient sur la chaise




Comment plier la chaise
Mettre tous les bras dans leurs positions initiales. Avec une main relever la barre comme fig., avec l'autre main tirer sur la partie avant de la chaise et plier l'ensemble au maximum pour retrouver fig. 1. Pour une meilleure sécurité la chaise est fournie avec une sangle qui empêche l'ouverture inopportune de la chaise.



Nettoyage et rangement.
Utiliser un liquide désinfectant pour matériel médical. Ranger la chaise dans un endroit propre et sec, loin d'une source de chaleur.

Dimensions:
Pliée mm.910H x 195P x 520L
Ouverte mm.910H x 710P x 520L
Poids : 8,50 Kg.
Charge maxi: 150 Kg.

PVS SpA Cassina de Pecchi I

LOT voir plaque sur la chaise

